



1
Coja la mascarilla y ábrala con ambas manos sosteniendo las bandas



2
Sostenga la mascarilla en su barbilla



3
Tire de las bandas hacia la parte trasera de las orejas y ajústelas hasta que se sienta lo más cómodo posible



4
Coloque los dedos de ambas manos en el centro del clip ajustable y presione hasta que esté perfectamente amoldada a la forma de la nariz

crambo

KN95 Protective Mask

Especificaciones

Tipo: Máscara facial / Máscara antibacteriana no reutilizable

Características: anti-bacteriana, anti-gripe, anti-polvo, antipolen, transpirable, no toxica, no irritante

Composición: 5 capas de filtración reforzada, tela no tejida con filtro de algodón electrostático con clip de nariz ajustable

Certificación: KN95 GB2626-2006

Eficacia de filtración BFE: > 95%.

Color: blanco

Clip ajustable con espuma para soporte nariz

Cinta de elastómero termoplástico para mejor ajuste

Certificados

Realizado por el laboratorio Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection acreditado por el CNAS para la norma GB2626-2006 con número de certificación L0579

Contenido de la caja

15 uds en bolsas individuales por caja

Tiempo de uso límite

-El respirador se puede usar hasta que esté dañado, la respiración se vuelva difícil o contaminado con sangre o fluidos corporales.
-Deseche después de cada uso cuando se emplee para procedimientos quirúrgicos.
-Siga las pautas y políticas nacionales, estatales, locales y de control de infecciones de las instalaciones.

Vida útil y almacenamiento

3 años a partir de la fecha de fabricación.

Conserve los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.

Almacene a temperaturas entre -5°C + 50°C y que no exceda el 80% de HR.