



1
Con la piel seca, abrir la mascarilla, con el paño de color claro hacia la cara y la barra de la nariz arriba



2
Coloque la cinta en la orejas a la izquierda y a la derecha y ajústela, de modo que quede fija de manera uniforme.



3
Ajustar la posición de la mascarilla, extenderla hacia arriba y abajo y cubrir completamente la boca y la nariz

crambo

Mascarilla RK2001

Especificaciones

- Mascarillas quirúrgicas desechables de 3 capas con gomas
- UNE-EN14683 TYPE IIR
- Composición: 25g hilado no tejido + 25g fundido soplado no tejido + 22g hilado no tejido
- BFE >99% (Eficiencia de filtración Bacteriana)
- Anti-bacteriana, anti-gripe, anti-polvo, antipolen, transpirable, no toxica, no irritante
- Con tira nasal moldeable fabricada en aluminio para su adaptación en la nariz y gomas elásticas para un ajuste perfecto.
- Dimensiones: 17cm*9.5cm
- Color: Azul

Certificados

UNE-EN14683 CE realizado por Nelson Laboratories, LLC 6280 S. Redwood Rd. Salt Lake City, UT 84123 U.S.A

Contenido de la caja

50 uds por caja en una única bolsa

Tiempo de uso límite

- Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h.
- En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

Vida útil y almacenamiento

- 3 años a partir de la fecha de fabricación.
- Conserve en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.
- Almacenar a temperatura ambiente. Evite temperatura y humedad excesiva